

## Korrektter Umgang mit Schlafapnoe

ronchAP®  
einfach. erholsam. schlafen.

### Die echte Alternative bei Schlafapnoe

Im Interesse des Patienten ist ein sorgfältiger Umgang mit Schlafapnoe erforderlich. Die Vielzahl der angebotenen Produkte zur Therapie und den abgegebenen "Versprechen" sind kaum noch überschaubar. Immer öfter wird versucht allerlei Hilfsmittel in die Nähe von Ronch®AP Spangen gegen Schlafapnoe zu positionieren. Dies gilt insbesondere für Schnarchspangen. Mit dieser Information wollen wir Transparenz schaffen und die verschiedenen Produkte aus unserer subjektiven Sicht richtig einordnen.

### Der Unterschied zwischen Schnarchspangen und Ronch®AP Spangen gegen Schlafapnoe (Nicht zu verwechseln mit Protrusionsschienen oder "Schnarchschienen")



#### Schnarchspangen

z.B. Ronchex® von Roncholine. Es existieren verschiedene Ausführungen am Markt. Stützt das Gaumensegel und hält es von der Rachenwand fern. Berührt keine Zähne, auch für Prothesenträger geeignet. Höchst wirksam gegen Schnarchen. In sehr seltenen Einzelfällen begrenzt wirksam gegen leichte obstruktive Schlafapnoe im **oberen Gaumenbereich**.



#### Ronch®AP Spange gegen Schlafapnoe

Weiterentwicklung der ursprünglich von einem Schweizer Tüftler erfundenen Schnarchspange. **In der Schweiz und der EU patentiert.**

Die einzige Therapie mit dem zuverlässigen 3-fach Schutz. Wirkt dreidimensional im Rachenraum auch bei schwerer obstruktiver Schlafapnoe.

- Stabilisierung des Gaumensegels
- Abstützung der hinteren Rachenwand
- Abstützung des Zungengrundes

#### Korrekte Anpassung von Gaumenspangen

Die Wirkung von Gaumenspangen hängt sehr stark von einer sorgfältigen Anpassung ab. Gaumenspangen von Roncholine werden darum ausschliesslich von professionell geschultem Personal individuell an die Anatomie der Patienten angepasst. Roncholine verwendet keine vorgeformten Fertigprodukte und bietet ausschliesslich Einzelbetreuung bei der Anpassung um die Hygiene und Intimsphäre der Patienten zu gewährleisten.

#### Wer passt an?

Obwohl Gaumenspangen nichts mit Zahnmedizin (Protrusionsschienen) zu tun haben eignen sich Zahnärzte, Zahntechniker aber auch HNO Arztpraxen ausgezeichnet zur Anpassung. Die Lizenznehmer von Roncholine sind darum HNO Arztpraxen, Dentallabors und Zahnärzte.

Das Anpassen von Spangen gegen Schlafapnoe muss zwingend ärztlich begleitet werden. Der Therapieerfolg muss mittels Polygrafie (mobiles Messgerät mit dem Sie zu Hause schlafen!) kontrolliert und bestätigt werden. Beim Anpassen durch Dentaltechniker und Zahnärzte ist darum die Zusammenarbeit mit Ihrem HNO-Arzt notwendig zur Kontrolle.

### **CPAP vs. Gaumenspangen**

Immer wieder wird suggeriert dass **Schnarchspangen** die CPAP Therapie (Atemmaske) ersetzen können. **Davon distanzieren wir uns in aller Form.**

#### **Eine Schnarchspange ist keine Spange gegen Schlafapnoe!**

Mehrere hundert versorgte und im Schlaflabor kontrollierte Patienten zeigen jedoch, dass Ronch®AP Spangen durchaus eine echte Alternative bei obstruktiver Schlafapnoe darstellen. Die medizinische Studie an der Universitätsklinik in München hat ergeben dass die Ergebnisse punkto Wirkung einwandfrei sind. Insbesondere bei einer CPAP-Intoleranz bedeutet Ronch®AP oft die letzte Lösung. Trotz kommerziellem Interesse werden wir uns nie einlassen auf das Ausspielen von CPAP gegen Ronch®AP.

Der Patient soll frei entscheiden! Wichtig ist, dass der Patient schnell und wirksam versorgt wird.

### **Endoskopie - Polygrafie - Diagnosen und ärztliche Kontrollen**

Zunehmend muss festgestellt werden, dass Anbieter von Schnarchspangen u. Schnarchschiene Untersuchungen mittels Endoskopie vornehmen. Auch Kontrollen mittels Polygrafie werden aus diesem Umfeld angeboten, teilweise durch die Vermietung von Polygrafiegeräten mit Auswertung. Diese Tätigkeiten sind jedoch ausschliesslich approbierten Medizinern vorbehalten und eigentlich klar gesetzlich geregelt.

Ronch®AP Spangen gegen Schlafapnoe werden nur mit ärztlicher Diagnose angepasst. Jeder Patient unterzeichnet einen Haftungsausschluss, dass keine Haftung übernommen wird ohne ärztliche Überprüfung des Erfolges (PG oder PSG) und jährlicher ärztlicher Kontrolle!

**Roncholine stellt keine Diagnosen und bietet keine Schlaftests in irgendeiner Form an!**

Für weitere Informationen stehen wir oder unser Lizenzpartner in Ihrer Nähe gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Roncholine**

## **Kontakte**

### **Zentrale**

#### **Roncholine Medizinprodukte**

Bahnhofstrasse 279 Erwin Dietrich Strasse 5  
CH-8262 Ramsen D-78244 Gottmadingen

0041 (0)52 743 12 03

[www.roncholine.com](http://www.roncholine.com) - [info@roncholine.com](mailto:info@roncholine.com)

### **Lizenzpartner**

**Ihren nächsten  
Lizenzpartner finden Sie  
unter  
[www.roncholine.com](http://www.roncholine.com)**