

ronch[®]AP

einfach. erholsam. schlafen.

**In der Schweiz
und EU patentiert**

Die einzige Therapie mit dem zuverlässigen 3-fach Schutz wirkt dreidimensional im Rachenraum bei

obstruktiver Schlafapnoe.

- Stabilisierung des Gaumensegels
- Abstützung der hinteren Rachenwand
- Abstützung des Zungengrundes
- **in der Schweiz und EU patentiert**

Ablauf Anpassung Ronch[®] AP

Sie haben eine ärztliche Diagnose obstruktive Schlafapnoe und interessieren sich für die Therapie mit Ronch@AP. Wir nehmen uns gerne viel Zeit für Ihre Fragen und die ausführliche Information. Dazu bieten wir Ihnen z.B. die Gratis Info-Sprechstunde. **Unverbindlich und kostenlos.**

Rufen Sie uns an oder verwenden Sie das Anmeldeformular unter www.roncholine.com

Phase 1

Individuelle Anpassung Ihrer persönlichen Übungsspanne. Dabei lernen Sie das Handling und Einsetzen der Spange. Während ca. 2 Wochen machen Sie sich nun mit Ihrem Therapiegerät vertraut.

Phase 2

Sie haben nun quasi vergessen, dass Sie mit der Übungsspanne schlafen und es folgt die individuelle Anpassung Ihrer Original Ronch@AP Testspanne für die ärztliche Überprüfung Ihres Therapie-Erfolges. Meist genügt dafür eine Polygrafie (mobiles Gerät mit dem Sie zuhause schlafen).

Sobald Ihr Arzt den Erfolg mit der Ronch@AP Spange verzeichnet, bekommen Sie von uns die definitiven Spangen in Phase 3.

Die Sauerstoffsättigung im Blut sollte gut sein und Ihr AHI sollte mindestens einen Wert unter 10 aufweisen.

Phase 3

Geschafft! Nun erfolgt die Anpassung von zwei definitiven Ronch@AP Spangen. Sie können wählen zwischen der praktischen Standard oder der etwas schickeren Diskret.

Die Testspanne bleibt Ihr persönlicher Prototyp und gehört Ihnen. Somit bekommen Sie nun drei Spangen mit nach Hause. Die zwei definitiven Ronch@AP Spangen sollen nicht abwechselnd getragen werden. Eine dient Ihnen zur Sicherheit und als Reserve.

Ronch@AP Ersatzspangen können später bequem per Postversand bestellt werden, da Ersatzspangen keine individuelle Anpassung mehr erfordern.

noch zwei Tipps

Bei etwa 20% der Patienten führt schon die allererste Übungsspanne zum erwünschten Erfolg. Das erspart natürlich Kosten. Falls Sie also bei der Übungsspanne den Eindruck haben dass Ihre Schlafapnoe bereits therapiert ist, kontaktieren Sie uns. Wir werden gemeinsam überlegen ob wir die ärztliche Kontrolle vorziehen und evtl. die Übungsspanne entsprechend als Ronchex@ Plus zur definitiven Therapiespanne anpassen können.

Für die ärztliche Kontrolle reicht meist eine Polygrafie, also eine Aufzeichnung des Schlafes mittels einem mobilen Messgerät. Dies hat für Sie den Vorteil, in Ihrer gewohnten Umgebung schlafen zu können.